



EMS pėdų elektrinis išmanus impulsinis kilimėlis, masažuoklis

Generuota 2025-04-19

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

EMS kilimėlis

IŠSAMIAU

EMS elektrinis impulsinis kilimėlis / masažuoklis skirtas tiems, kurie ilgai avi aukštakulnius, kuriems skauda ir pavargsta pėdos, ilgai stovi ir pradeda skaudėti kojas, šąla pėdos, sutrikusi kraujotaka ir t.t. EMS gali tik masažuoti pėdų pagalvėles. Valdomas nuotoliniu pulteliu, taip pat galima ir palaikyti rankų delnus.

Papildoma informacija

Prekės aprašymas :
Pavadinimas: EMS pėdų elektrinis išmanus impulsinis kilimėlis, masažuoklis
Dydis: 32 cm * 29 cm * 2,8 cm
Maitinimas: USB
Masažo principas: vibracija
Režimo intensyvumas: 6 režimai, 9 lygių intensyvumas.
Darbinė įtampa: 3,7V
Darbo laikas: 15 minučių
Darbinė srovė: 15mA

TIPAS

1. Padėkite pėdas ant masažo kilimėlio lygiai, įjunkite nuotolinio valdymo pultą ir sureguliuokite jį pagal savo jėgą.
2. Paspauskite ir tris sekundes palaikykite M / +, kad įjungtumėte pagrindinį kompiuterį, išjunkite ir paspauskite OFF /- iki nulinės padėties, tada paspauskite ir palaikykite M, kad išjungtumėte.
3. Galite perjungti šešis masažo režimus, kurie yra: minkymas, trankymas, akupunktūra, masažas, akupresūra, pulsas.
4. Jėgos reguliavimas. Paspauskite ON / +, kad padidintumėte intensyvumą; paspauskite OFF /-, kad sumažintumėte intensyvumą.
5. Kaskart rekomenduojama naudoti po 30 min., 1 – 2 kartus per dieną.
6. Įrenginį geriau naudoti praėjus 30 minučių po valgio ar vonios.